

Programa Infantil Phonak

Dicas de Cuidados com os Aparelhos Auditivos



O aparelho auditivo é um dispositivo eletrônico responsável por amplificar e tratar o som para torná-lo audível a pessoa que apresenta uma perda auditiva.

Para que a pessoa tenha acesso aos sons de maneira clara e confortável, atualmente a maioria desses dispositivos conta com processadores que analisam e modificam a informação sonora para enviar ao usuário.

Como qualquer dispositivo eletrônico miniaturizado, os aparelhos de amplificação necessitam de cuidados para garantia do seu desempenho no processamento da informação e funcionamento.

Por este motivo, elaboramos este pequeno guia com algumas dicas de cuidados para que os aparelhos auditivos desempenhem sua função adequadamente.

1. Manuseio:

- Os dispositivos são desligados quando abrimos a gaveta da pilha. Evite pressão ao abrir e fechar esta gaveta. Isso poderá danificar o componente. Atenção especial se houver um receptor de FM acoplado



- Sempre desligue o dispositivo antes de guardá-lo
- Guarde-o em local seguro. Atenção para animais domésticos!
- Guarde-os em local seco, livre de umidade. A umidade é o principal inimigo dos aparelhos auditivos.
- Não molhe os aparelhos. Evite contato da bateria com superfícies úmidas.
- Respeite os períodos de revisão recomendados pelo fabricante

2. Colocação



1

Pegue o aparelho pelo molde



2

Insira o molde no conduto com cuidado




3

Acomode o molde no conduto e o aparelho atrás da orelha

Programa Infantil Phonak

3. Troca de pilha

- A pilha dos dispositivos possui um período de funcionamento que varia de acordo com a potência do aparelho, características do ajuste e o tempo de uso pelo usuário.
- Evite contato dos dedos com a perfuração central da pilha. O ideal, na troca, é manuseá-la pelas bordas laterais.
- Atenção para a posição correta de colocação indicada pelo fabricante
- Respeite o período de troca recomendado pelo profissional de saúde auditiva
- No caso de crianças, é extremamente importante a verificação da carga de pilha antes de colocar os aparelhos. Para tanto, utilize um medidor, como na figura a seguir:



Uso do medidor de pilha

1 - Coloque a pilha no medidor com o lado + para cima

2 Se as linhas escuras aparecerem até a borda superior a carga está cheia. Caso visualize o espaço branco até a linha dos 65%, a carga está fraca.

- Vale a recomendação de enviar para a escola um par extra de pilhas e orientar o professor caso seja necessária a troca.

4. Limpeza


- Utilize um pano seco ou escova apropriada
- Utilize a bombinha de ar para retirar a umidade do tubo
- Os moldes poderão ser lavados 1X semana. Desconecte-os do tubinho de condução do som que está conectado no ângulo do aparelho e lave-o com sabão neutro. Seque bem antes de conectá-lo aos aparelhos.
- A utilização dos desumidificadores durante a noite garante um bom funcionamento dos dispositivos por maior tempo



Bombinha de limpeza e tubo

Uso do desumidificador

- 1- Coloque o aparelho com compartimento de pilha aberto no recipiente interno do desumidificador
- 2- Coloque a cápsula desumidificadora no recipiente desumidificador.
- 3- Acomode o recipiente interno
- 4- Retire o molde se achar necessário
- 5- Feche o recipiente



Qualquer dúvida escreva para contato@programainfantilphonak.com.br ou _____.